

Heraeus



Venus[®] Supra

Polissoirs pour un
brillant éclatant durable

Venus[®]

La nouvelle esthétique.



Sentez la différence.
Percevez la différence.

Venus Supra crée la différence.



Restauration en composite, polie



Venus® Supra
Restauration en composite, polie



Venus Supra – La touche finale de vos restaurations

Ce système de polissoirs diamantés universels procure un poli et un brillant réels et durables de chaque restauration en composite en deux étapes seulement, pour un rendu esthétique naturellement beau.

Venus Supra – Pratique et économique

Les polissoirs Venus Supra sont autoclavables et peuvent être réutilisés plusieurs fois, en fonction du type et de la taille des restaurations polies.



Venus Supra – Des polissoirs pour des résultats “Supra”

Utilisez Venus Supra pour le polissage de tout vos composites : vous obtiendrez des belles restaurations en composite naturelles d’un poli et d’un brillant parfaits et durables!

Les polissoirs de pré-polissage et de brillantage Venus Supra sont en silicone à haute teneur en poudre diamantée micro-fine. Les 5 formes différentes offrent une solution universelle pour toutes les restaurations antérieures et postérieures.

Venus Supra - 2-étapes pour une esthétique permanente

1. Rouge → polissoirs de pré-polissage



2. Gris → polissoirs de brillantage



Réalisez des restaurations en composite invisibles et d’un brillant naturel en seulement 2 étapes, sans changer plusieurs fois d’instruments et en enlevant une quantité minimale de matériau.




Venus Supra – Résumé des avantages

Haute teneur en poudre diamantée micro-fine	Brillant naturel durable
Usage universel	Un seul système pour toutes les restaurations en composite
2 étapes seulement	Economie de temps
Autoclavable et réutilisable	Economique

De belles restaurations naturelles... tout le temps!

Venus Supra - Un brillant extrême de tous les composites

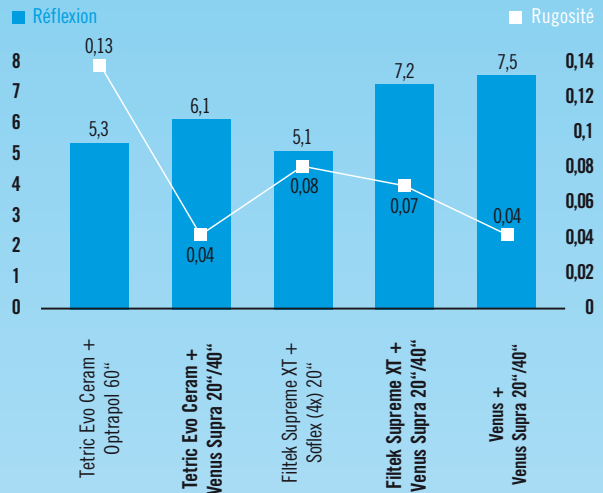

Source: R&D de Heraeus Kulzer, Wehrheim, Allemagne
Non publié. Données fichées.

Venus Supra a réalisé la rugosité de surface la moins importante, diminuant ainsi le risque d’accumulation de plaque et de coloration au fil du temps. Le brillant élevé (réflexion) observé avec tous les composites polis avec Venus Supra a conduit à des résultats esthétiques durables.

Vous souhaitez en savoir plus sur Venus ?
Connectez-vous à www.heraeus-venus.com

Venus Supra

Produit _____ Référence _____

Venus Supra Kit _____ 66039110
10 polissoirs: un polissoir de pré-polissage
et un polissoir de brillantage de chaque forme



Réassort Venus Supra

10 polissoirs d'une même forme:
5 polissoirs de pré-polissage + 5 polissoirs de brillantage

■ Cupule _____ 66039161



■ Disque _____ 66039162



■ Flamme _____ 66039163



■ Cupule grande taille _____ 66039164



■ Flamme grande taille _____ 66039165



Contact au Benelux
Heraeus Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
F +31 (0)23 543 42 55
info-benelux@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.com
www.heraeus-venus.com

Contact en Suisse
Heraeus Kulzer Schweiz AG
Ringstrasse 15A
CH-8600 Dübendorf
T +41 (0)43 333 72 55
F +41 (0)43 333 72 51
officehkch@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.ch
www.heraeus-venus.com